

CGM startdokument

– Pumpefunktioner og checkliste – starte med kontinuerlig glukosemåling (CGM)

For at du let og enkelt skal kunne starte med at anvende CGM funktionen i din insulinpumpe, er det vigtigt, du får tilstrækkelig med information. Det er dit ansvar at tage vare på din egen behandling og at anvende pumpen korrekt. Vi har lavet en checkliste som kan hjælpe dig med at kontrollere, hvilken information du har fået. Læs gerne selv materialet og stil spørgsmål fra starten. Sæt flueben efterhånden. Husk, du kan have fået informationen på andre tidspunkter!

Introduktion	CGM	Øvrig information
<p>Forstå CGM</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trendinstrument<input type="checkbox"/> Erstatte ikke BG måling<input type="checkbox"/> Viser retning og hastighed<input type="checkbox"/> Insulindoser og dosisjustering udregnes efter BG taget fra fingerspidsen <p>Start med CGM</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tag senderen ud af æsken<input type="checkbox"/> Notér start dato<input type="checkbox"/> Registrer senderen<input type="checkbox"/> Gem æsken <p>Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Indstil alarmer<input type="checkbox"/> Højt og lav BG<input type="checkbox"/> Stigningshastighed<input type="checkbox"/> Mindskningshastighed<input type="checkbox"/> Udenfor område<input type="checkbox"/> Fast alarm på 3,1mmol/L <p>Sætte Sensoren</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Gem forpakningen (rekl.)<input type="checkbox"/> Horisontalt<input type="checkbox"/> Maven (underhudsfedt)<input type="checkbox"/> Rengør huden<input type="checkbox"/> Fjern hår ved behov<input type="checkbox"/> 7 cm fra infusionsæt <p>Grundlæggende funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Genvejsknap til CGM<input type="checkbox"/> Start måleperioden<input type="checkbox"/> Start efter 2 timer<input type="checkbox"/> Indtast 2 blodglukoseværdier for at starte	<p>Kalibrering = BG test</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ved start – 2 stk<input type="checkbox"/> Hver 12 time<input type="checkbox"/> Når som helst<input type="checkbox"/> Mellem 2,2 – 22,2 mmol/L<input type="checkbox"/> BG fra Ez Carb - OK <p>CGM-trend</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> BG konstant i bevægelse<input type="checkbox"/> Pile<input type="checkbox"/> CGM data aktuel tid<input type="checkbox"/> Diagram 1, 3, 6, 12 og 24<input type="checkbox"/> Farvekoder<ul style="list-style-type: none">- Rød- Grøn- Blå <p>Afslutning af måleperioden</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Automatisk efter 7 døgn<input type="checkbox"/> Påmindelse 6-, 2-timer og 30 min før stop<input type="checkbox"/> Bekræfte afslutning<input type="checkbox"/> Vælg Start/Stop CGM-menuen - vælg afbryd <p>Fjerne sensoren/senderen</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Løsn plastret fra kroppen, og fjern det "hele" på een gang(sensor/sender)<input type="checkbox"/> Løsn ikke senderen når sensoren stadig sidder på kroppen<input type="checkbox"/> Løsn senderen fra sensorpladen med sikkerhedslåsen<input type="checkbox"/> Kassér IKKE senderen! Flergangs – 6 måneders garanti	<p>Advarsler og alarmer</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Insulintilførslen påvirkes ikke af advarsler og alarmer<input type="checkbox"/> Fast sikkerhedsalarm 3,1mmol/L kan ikke inaktiveres <p>CGM-historik</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kun under måleperioden<input type="checkbox"/> Seneste kalibrering<input type="checkbox"/> CGM advarsler <p>Sådan skal du kalibrere</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Vask hænderne<input type="checkbox"/> Samme BG måler<input type="checkbox"/> Kalibreret BG måler<input type="checkbox"/> Test fra fingerspidsen (kapillærprøve) <p>Kalibrer ikke hvis</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ANT eller ??? vises<input type="checkbox"/> BG > 22,2 eller < 2,2<input type="checkbox"/> BG fra alternative stikkesteder <p>Kontraindikation</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Paracetamol (alle doser) Anvend f.eks ibuprofen<input type="checkbox"/> MR (magnetresonanskamera) 

DK-1055-170208

Ifølge loven er vi forpligtet til, at have sporbarhed af vores produkter. Dette betyder, at vi skal være i stand til, at kunne kontakte dig med vigtige oplysninger, hvis det er nødvendigt. Vi beder dig hjælpe os ved at udfylde nedenstående formular.

Det udfyldte dokument kan sendes direkte til vores lokale produktspecialist eller gives til sygeplejersken.

Obligatoriske oplysninger

Pumpens serienr.: _____ Pumpestartsdato: _____

Sender ID: _____ CGM-startdato: _____

Pumpebrugerens navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____ Tel: _____

Fødselsdato _____

E-mailadresse: _____

Frivillige oplysninger

Hvilket sygehus/afdelinger du tilknyttet? _____

Hvad hedder din diabetessygeplejerske/læge? _____

	Ja	Nej
Vil du have nyhedsbrev via E-post?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Har du tidligere haft pumpe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------	--------------------------

Hvis **Ja**, Hvilken model og mærke? _____

Har du anvendt CGM før?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Hvis **Ja**, Hvilken model og mærke? _____

Vær venlig at skrive under på, du har fået informationen som findes i checklisten på næste side.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi, Rubin Medical AB, reg.nr. 556667-6721, med adresse PO Box 30044, 200 61 Limhamn og e-mail: info@rubinmedical.se, er registeransvarlige for anvendelsen af personlige oplysninger, som du angiver ved bestilling af vores produkter og tjenester. Vi kan med dit samtykke kontakte dig personligt, via e-mail, post eller telefon for at give dig information om produkterne (f.eks. produkt tilbagekaldelse og vigtig produktinformation), services, samt udsendelse af nyhedsbrev. Dine personlige data kan blive overført til producenterne af de produkter vi tilbyder både inden- og udenfor EU/EES. Overførsler af personlige data til USA foregår under standardiserede databeskyttelsesregler, som du kan få adgang til ved at kontakte os. Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi har om dig og kan anmode om disse oplysningerne ved at kontakte os.

Hvis dine personlige oplysninger behandles i strid med persondataloven har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger korrigeres, blokeres eller slettes.

Du kan til enhver tid kontakte os hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller anmode om at dine oplysninger overføres til en anden registeransvarlig.

Hvis du ikke anmoder om sletning eller trækker dit samtykke tilbage slettes alle data på dig et år efter du er ophørt med at være kunde hos os samt modtagelse af vores nyhedsbrev. Du har ret til at rapportere forkert håndtering af personoplysninger til Datatilsynet.

Jeg accepterer, at mine personlige data anvendes, for at modtage bestilte produkter og tjenester, samt vigtige oplysninger om de produkter, jeg anvender.

Pumpebrugerens underskrift: _____ (alt. forældrenes underskrift)